

四、线材的调整

注意：在装线材之前要确保支臂是可以充分伸展的，当安装或移动床位分机时一定要谨慎避免人身伤害和设备的损坏，一定要确保线材的长度和松弛度以方便支臂的移动。

- 1、床位分机的电源及网线接口。在床位分机的最高位置，这样确保线材在支臂下面，方便移动床位分机时，线材可以拉伸，如图7：
- 2、将线材镶入支臂下面的线槽内，按进线材盖防止线材脱离线槽，如图8：



五、调节力度、角度及注意事项

注意：如不放松螺钉强行扳动支臂或床位分机，将导致支臂或床位分机的损坏。


- 1、调整气弹簧臂的阻尼时，请用手扶住床位分机。根据床位分机的重量，可能需要调整气弹簧臂平衡机构的位置，如果床位分机不能自主定位的话，用4号扳手(D)调整位于气弹簧臂上面的圆头紧固螺钉，此调整可能需要进行多次，直至床位分机可自行定位为止，如图9：
- 2、通过调整支架的阻尼，可以使床位分机上下调节角度为 $\pm 90^\circ$ 度，让支架适合床位分机的使用。根据床位分机的重量，如果自动倾斜，那么就要调整支架的转轴处来实现上下 90° 度位置的调整。通过6号扳手(F)来调整支架上的螺钉，增加或减少阻尼来调整床位分机的倾斜调节。增加阻尼，可用6号扳手(F)按顺时针方向拧紧螺钉；减少阻尼，可用6号扳手(F)按逆时针方向放松螺钉。如图10：



移动推车
—— 安装调试使用说明 ——



一、推车部件详解

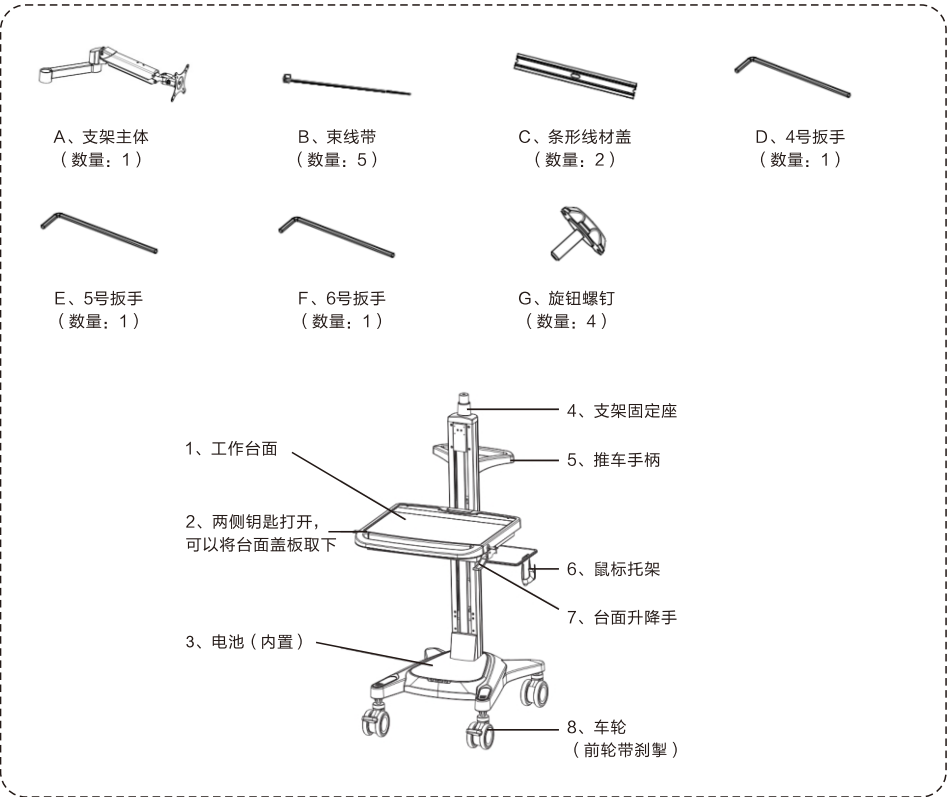

二、床位分机安装

1、请确保支架在用手扳动时能够容易旋转和倾斜, 如果需要调整的话请在下一个步骤之前调整完毕, 如图1:



2、将床位分机的显示屏正面朝下放在保护面上, 如图2:



3、用旋钮螺钉(G)对准支架主体(A)的安装板上孔洞和床位分机的螺丝孔位和, 如图3:

4、拧紧旋钮螺钉(G), 床位分机就被安装到安装板上了, 如图4:

(提示: 不要拧的过紧, 如果拧不动应立即停止。)

三、支架固定到推车

1、将装好床位分机的支架主体(A)从上到下套入到支架固定座上, 如图5:



2、如需单节使用时, 可以用5号扳手(E)将斜盖板拆开, 再将带有分机端的支臂从上到下套入到支架固定座上。

