


产品名称：护理标识（型号：NBN-ZT）



一、功能简介

- 配合病床分机使用，一张病床对应安装一个；与病房门口机间一条三芯总线连接。
- 壁挂式安装，一般安装在病床上方的墙壁或设备带上（如右图）。
- 有护理等级、计量、饮食、隔离、过敏5种护理状态标识，并通过灯亮的方式显示每种护理状态。
 - ① 护理等级：普通护理，灯亮“红色”；高级护理，灯亮“蓝色”；特级护理，灯亮“绿色”。
 - ② 计量：无计量，灯亮“绿色”；尿计量，灯亮“红色”。
 - ③ 饮食：普通饮食，灯亮“绿色”；半流饮食，灯亮“蓝色”；全流饮食，灯亮“紫色”；禁止饮食，灯亮“红色”。
 - ④ 隔离：无隔离，灯亮“绿色”；隔离，灯亮“红色”。
 - ⑤ 过敏：无过敏，灯亮“绿色”；过敏，灯亮“红色”。
- 尺寸：86x86x32mm(LxWxH)。
- 总线通讯距离：
 - 不含显示屏类的NBW系列分机(型号有：NBW-B1、NBW-A1、NBW-AB、NBW-B1M)：
 - a)、一条总线上带满15个病房门口机+30个不含显示屏类的分机+30个护理标识时，含广播功能：75m(0.75mm2)；100m(1.0mm2)；150m(1.5mm2)；200m(2.0mm2)。
 - b)、一条总线上带满30个病房门口机+30个不含显示屏类的分机+30个护理标识时，含广播功能：60m(0.75mm2)；80m(1.0mm2)；120m(1.5mm2)；150m(2.0mm2)。

附--安装孔位图：

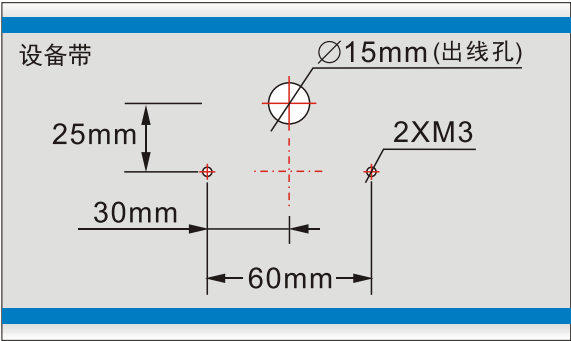

二、设置说明

- 1、接线方式：

将护理标识的白、黑、红三芯线对应并接到病房门口机的1、2、3总线上。
- 2、在线编码：（例：将护理标识编码成1号）

点击病房门口机触摸显示屏右上角的“系统设置”按钮，选择“在线分机编码设置”选项，分机处用直径约1~2mm的牙签或木棍，轻轻按住护理标识底部小孔内的轻触按钮约3秒（如右图），此时病房门口机会接收到编码请求，选定病房门口机上的第1路路选按键，该路选按键显示“已对码”，此时可看到护理标识呈绿灯快闪状态则提示编码成功。

按上述方法将所有护理标识依此编码。

