


床位分机


产品安装使用说明



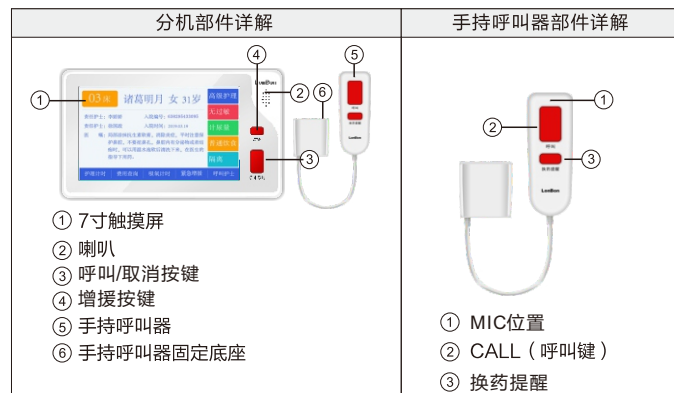

一、安装调试:

1、产品安装图:

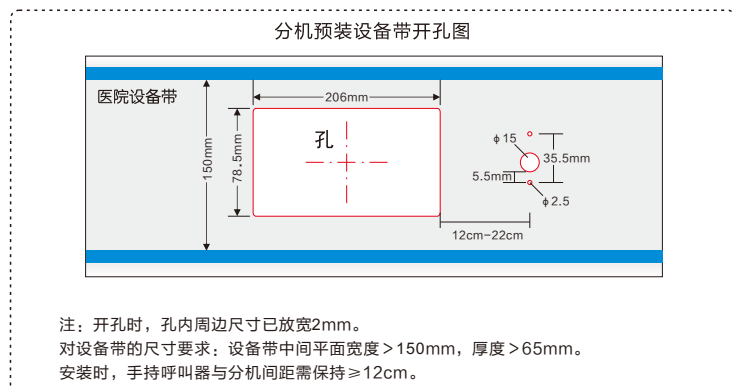


2、背面接口说明:

(1) 总线接口:

- ① 与模拟门口机 (NBN-BM) 连接时: 将分机背后的1、2、3接口对应并联到模拟病房门口机的接分机1、2、3总线上。
- ② 与模数病房门口机 (NN-B10A/B10B) 连接时: 将分机背后的1、2、3接口对应并连到模数门口机的1、2、3总线上。
- ③ 与模数转换器 (NNV-AD) 连接时, 将分机背后的1、2、3接口对应并联到模数转换器的接分机的1、2、3总线上。

(2) 门灯接口: 将分机的门灯电源、门灯控制、地线分别对应接在门灯的黄红黑(NBW-ME)或红白黑(NBW-ME5)。

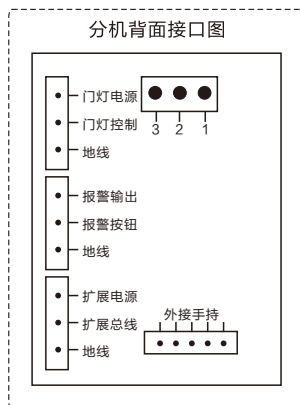

(3) 外接防水按钮:

- ① 接ANW4时, 按钮的红、白、黑线分别对应接在分机的报警输出、报警按钮、地线上。
- ② 接ANW3时, 按钮连接线不分极性, 接在防水按钮和地线上。

(4) 扩展接口: 将按钮接线盒 (AN-K) 的电源、信号、地线分别对应接在分机的扩展电源、扩展总线、地线。

(5) 手持接口: 将手持线上的端子与“外接手持”接口连接, 连接时需注意端子方向。(连接后即可通过手持与主机进行呼叫对讲)。

二、设置调试:

分机使用前需先按对应床号编辑分机地址。

例: 将分机设置成5号分机。

将设备通电后, 主机需进入“系统设置”菜单, 选择“编码设置”项, 准备给分机编码。此时按住分机的“呼叫/解除”按键约5秒, 此时主机将收到分机的编码请求, 此时按下5号路选按键, 当主机提示“已对码”, 即编码成功。编码结束后, 主机退出编码界面会再次对所有分机进行检测。

三、使用说明:

- 1、电子床头卡功能: 分机屏幕具备电子床头卡功能, 在屏幕上可以查看床号、患者信息、病情、医嘱、住院编号、护理标识等, 所有信息来源于HIS, 可根据数据库自动更新, 无需手动维护。
- 2、入院须知: 信息来源同步HIS, 点击可查看入院后的注意事项, 患者可自己查看避免护士口述, 减少护士工作量。
- 3、费用查询: 信息来源同步HIS, 患者可查询入院后的费用清单。
- 4、护理计时: 此功能由医护人员使用, 触发时启动计时功能, 再次触发结束计时功能, 记录会保存至本机, 如系统内设置了录音录像管理服务器则会同步上传至服务器保存。
- 5、请求增援: 是一种高级别的呼叫, 一般由医护人员使用。触发“请求增援”按键后, 护士站主机将播报“xx床请求增援”, 其他医护人员听到后需立即前往帮助。
(如需了解情况, 可点击对应的分机按键与之对讲。)
- 6、呼叫护士: 手持和分机面板上都有呼叫护士的按键, 方便患者使用。触发后即可呼叫到护士站主机, 主机接听即可双向通话。
- 7、换药提醒: 这是一个有针对性的报警提示, 区别于呼叫和请求增援。当触发“换药提醒”按键后, 护士站主机将播报“xx床换药提醒”。听到播报后护士即知道这个床的患者需要换药。
- 8、接收广播: 分机可接收护士站主机发布的MP3广播和喊话广播。