

IP门口机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

① 显示屏 ② 喇叭 ③ 摄像头（部分机型具备） ④ 刷卡区（部分机型具备）
⑤ 触摸按键 ⑥ MIC位置 ⑦ 固定卡扣（需插入拨片松开）

说明：

1、有86盒线槽时，壁挂板挂钩朝外并将凹槽扣合在86盒线槽上来确定好位置（若现场86盒偏高或偏低，可适当调整壁挂板高度，以保证走线不受影响为前提），固定好壁挂板螺丝；如需先在墙面上开螺丝孔，螺丝孔距见上图；

2、无86盒线槽时，壁挂板挂钩朝外、底部建议离地面高度约1.4米左右，固定好壁挂板螺丝（此时可利用设备底壳明线槽走线）；如需先在墙面上开螺丝孔，螺丝孔距见上图；

3、将86盒内线缆或明装引线缆，接好在设备的接口上，再将设备的挂钩槽对准壁挂板挂钩上，向下推动卡住即可；如需拆卸时，需从设备上方右侧区域插入拨片以松开卡扣，再将设备往上托起即可。

2、背面接口说明：

(1) 网络接口：将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口（注意方向），再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) 电源接口：将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向)，红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接，给设备供电(供电范围12~24V)。


(3) 外部接口：(接入和断开外部配件时，设备需先断电)

① 外接门灯(HBW-ME)：将门灯接口的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

② 外接门灯(NBW-ME5)：将门灯接口的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

③ 外接2芯线报警按钮(ANW3)：将报警接口的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。

④ 外接3芯线报警按钮(ANW4)：将报警接口的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。

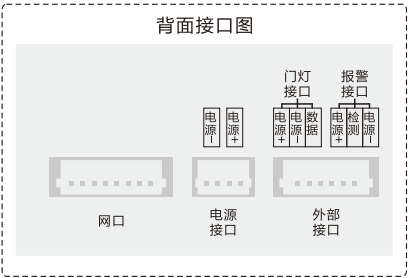

二、设置调试

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

1、基本设置：

设备通电后，在启动界面会显示本机的IP地址(默认为192.168.1.168)，登录该设备的网页(登录地址即该设备的IP地址，账号密码均默认为admin)，进入基本设置界面，设置方法如下，如将该设备设置成1号主机下的1号门口机，依次输入以下信息

A、编号设置

本机编号：主机路数根据1号主机实际型号路数选择，路数决定了门口机的编号最大值，主机编号框输入1，门口机编号框输入1。

地址盒IP：输入和1号主机基本设置界面里的相同服务器地址盒IP，如192.168.1.169。

B、网络设置

IP地址：输入该设备所分配的IP地址，如192.168.1.101。

子网掩码：输入该设备所分配的掩码地址，如255.255.255.0。

默认网关：输入该设备所分配的网关，如192.168.1.1。

C、病房号

病房号：输入该设备所分配的房间号或名称，如101房。

IP门口机

系统信息

基础设置

高级设置

软件更新

配置管理

安全设置

工厂调试

系统维护

系统重启

基础设置

编号设置：

本机编号：

120路主机

060

+

096

(主机路数+主机编号+分机编号)

医生主机：

000

提示：设置后可通过呼叫医生按钮，呼叫医生办公室主机。

房间名称：

96

提示：设置后可实时更新，最多可输入10个汉字。

网络信息：

IP地址：

192 . 168 . 3 . 196

子网掩码：

255 . 255 . 255 . 0

网关：

192 . 168 . 3 . 1

服务器设置：

服务器IP：

192 . 168 . 3 . 22

通讯端口：

8080

提示：通讯端口默认为8080，服务器网页后台端口更改后，需对应更改此端口。

保存

2、分机编码：

若该门口机还需要管理床位分机时，还需要将该门口机关联病床分机编号，可通过主机的病房一览界面长按该门口机编号路选按钮，并根据提示选择需要关联的病床分机编号即可；还可以通过服务器网页端智慧病房-病房对讲设备-设备绑定页面对应的主机号下的门口机编号选择需要关联的病床分机编号。

3、设置工具或APP：

打开设置工具，根据门口机的mac地址搜索或直接选择该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等设置。

打开APP，通过扫描门口机初始界面上的二维码信息，对该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等设置。

三、使用说明：

1、呼叫主机：

按下门口机右下的呼叫按键，即进入呼叫状态，待主机接通后，可进行双向全双工通话。

2、进入护理：

按下门口机右下的护理按键，即进入护理中状态，主机及其他设备会提示该房护理中等提示，取消时再次按下护理按键即可。若该门口机所绑定的病床分机有呼叫时按下护理按键，会先清除病床分机的呼叫，再进入到护理中状态。

3、信息显示：

该门口机除了显示病房号、床位号、患者信息详情、责任医生和责任护士姓名和照片等展示信息外，还可以显示病床分机的呼叫、洗手间报警等联动提示信息。

4、门灯提示：

该门口机除了两侧内置灯带外，还可以外接门灯扩展，主要用来门口机的进入护理状态、绑定的病床分机呼叫、以及洗手间报警等闪亮提示用。