

IP门口机

— 安装调试使用说明 —





一、安装调试

1、产品安装图：

安装铁底盒预埋墙面流程图

安装提醒：
1、如果是毛坯墙，预埋底盒时需预留粉刷层（或瓷砖）的厚度，确保底盒的翻边与粉刷层（或瓷砖）的表面紧贴。
2、施工完成后，请及时清理底盒内的石灰、水泥等杂物。
3、为防止机器松动，将防脱扣置于机器上方，硅胶套紧紧顶住机器上方铝框之后拧紧螺钉。

2、背面接口说明：

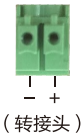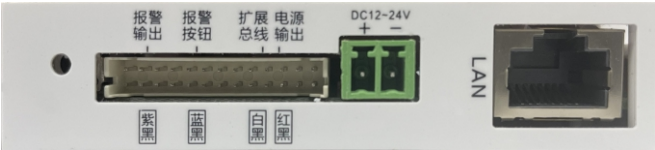

- ① **网络接口：**LAN口，通过网线插入到路由器(或交换机)LAN端任一端口上。

② **电源接口：**DC12~24V口，通过转接头（见上图）将电源适配器或电源箱的+、-极接入，给设备供电，需注意正负极性，及电压范围在12~24V。

③ **外部设备接口的应用**(参考右图)：

① 外接门灯(NBW-ME)：将门口机外部设备接口的红(电源输出)、白(扩展总线)、黑(地线)3芯引线对应接到门灯的黄、红、黑3芯线上。**(若设备背部接口贴有门灯数据时，门灯的红线需接到对应的蓝2引线上。)**

② 外接门灯(NBW-ME5/HBW-ME)：将门口机外部设备接口的红(电源输出)、白(扩展总线)、黑(地线)3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。**(注：若设备背部接口贴有门灯数据时，门灯的白线需接到对应的蓝2引线上。)**

③ 外接报警按钮(ANW3)：将门口机外部设备接口的蓝1(报警按钮)、黑(地线)2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。

④ 外接报警按钮(ANW4)：将门口机外部设备接口的紫(报警输出)、蓝1(报警按钮)、黑(地线)3芯引线对应接到报警按钮的红、白、黑3芯线上。

⑤ 外接按钮接线盒(AN-K)：将门口机外部设备接口的红(电源输出)、白(扩展总线)、黑(地线)3芯引线对应接到按钮接线盒的电源、信号、地线接口上。
- | 外部设备接口功能与颜色对照表 | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------|-----|-----|------|------|--|
| 未启用 | 报警输出 | | | 报警按钮 | 未启用 | 未启用 | 扩展总线 | 电源输出 | |
| 粉黑 | 紫黑 | | | 蓝1黑 | 蓝2黑 | 棕黑 | 白黑 | 红黑 | |

二、设置调试

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

1、基本设置：

设备通电后，在启动界面会显示本机的IP地址(默认为192.168.1.168)，登录该设备的网页(登录地址即该设备的IP地址，账号密码均默认为admin)，进入基本设置界面，设置方法如下，如将该设备设置成1号主机下的1号门口机，依次输入以下信息

A、编号设置

本机编号：主机路数根据1号主机实际型号路数选择，路数决定了门口机的编号最大值，主机编号框输入1，门口机编号框输入1。
地址盒IP：输入和1号主机基本设置界面里的相同服务器地址盒IP，如192.168.1.169。

B、网络设置

IP地址：输入该设备所分配的IP地址，如192.168.1.101。
子网掩码：输入该设备所分配的掩码地址，如255.255.255.0。
默认网关：输入该设备所分配的网关，如192.168.1.1。

C、病房号

病房号：输入该设备所分配的房间号或名称，如101房。

系统信息

基本设置

高级设置

软件更新

配置管理

安全设置

工厂调试

系统维护

系统重启

基本设置

保存

编号设置

本机编号: 30路主机 001 001 (主机路数+主机编号+ 门口机编号)

地址盒IP: 192.168.1.169

网络设置

IP地址: 192.168.1.101 (填写后会触发检测机制,请耐心等待!)

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

病房号

病房号: 101房

(修改单位名称内容实时更新, 无需保存配置, 最多不能超过10个字)

2、分机编码：

若该门口机还需要管理床位分机时，还需要将该门口机关联病床分机编号，可通过主机的病房一览表面长按该门口机编号路选按钮，并根据提示选择需要关联的病床分机编号即可；还可以通过服务器网页端智慧病房-病房对讲设备-设备绑定页面对应的主机号下的门口机编号选择需要关联的病床分机编号。

3、设置工具或APP：

打开设置工具，根据门口机的mac地址搜索或直接选择该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等进行设置。
打开APP，通过扫描门口机初始界面上的二维码信息，对该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等进行设置。

三、使用说明：

注：该门口机主要作为电子门牌展示信息用，一般无需操作，直接观看展示的信息内容和呼叫报警时的提示用即可。

1、信息显示：

该门口机除了显示病房号、床位号、患者信息详情、责任医生和责任护士姓名和照片等展示信息外，还可以显示病床分机的呼叫、洗手间报警等联动提示信息。

2、门灯提示：

该门口机除了自带一体化式门灯外，还可以外接门灯扩展，主要用来绑定的病床分机呼叫、以及洗手间报警等闪亮提示用。